



## 世界一軽い！装着型エア・マウス

Zono（ゾノ）は身体に装着して使うフィンランド製のワイヤレスマウスです。

高い精度と装着の自由度、多彩なユーザー補助機能、さらに外部スイッチやアプリとの併用による拡張性を備え、頸髄損傷や神経難病、脳性麻痺など様々な症状の方にお使いいただけます。

### 身体と一体化するマウス

Zono 本体の動きがマウスポインターの動きに変換されます。高精度ジャイロがわずかな動きでも捉えるため、身体と一体化したような、なめらかな使い心地を実現しています。

マッチ箱ほどのサイズで重さはわずか 23g。世界一の軽さ（メーカー調べ）を誇るマウスです。ヘッドバンドやベルクロ等のオプションによって、頭や手足などユーザーが最も動かしやすい場所に装着できます。

### 多彩な調整・ユーザー補助機能

付属の調整ツール（Windows アプリ）を使って、感度調整や震え補正など様々な調整や補助機能のオン/オフが可能です。


指定時間（0.1～5.0 秒）止めると自動で左クリックする「オートクリック」は非常に便利です。

### ダブルクリック、右クリックはスイッチやソフトとの組み合わせで

専用の非接触式呼吸スイッチ「Sento」を使えば左クリック、ダブルクリック、ドラッグが直観的にできるようになります。詳細は裏面をご覧ください。

また Zono にはスイッチを 2 つ接続でき、ダブルクリックや右クリックも可能になります。「Sento」で左クリック、外部スイッチで右クリック、という使いかたもできます。

マウス操作支援ソフト「**クリックアシスト**」と一緒に使えば、PC のあらゆる機能をマウスポインターの動きだけで使えます。テクノツールの web サイトよりクリックアシストの無料版をお試しできます。

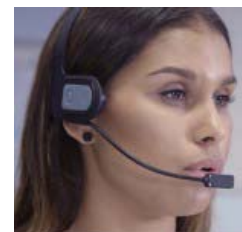

#### <仕様>

サイズ（送信機）	: 59 mm × 33 mm × 15 mm
重量（送信機）	: 23 g
対応機種	: HID マウスプロファイルに対応した Windows Vista 以降、Android Mac OS X 以降、Linux 等の端末 ※設定ソフトは Windows のみ対応
インターフェース	: USB 2.0（受信機）
無線	: 2.45 GHz 帯 最大接続距離 10m ※工事設計認証取得済み
電池	: リチウムポリマー充電電池

#### <パッケージ>


・送信機	× 1
・受信機（USB 差込式）	× 1
・充電用ケーブル	× 1
・スイッチ接続用アダプタセット	× 1
・ユーザーマニュアル	× 1
・設定ソフトインストール用 CD	× 1






## Sento ヘッドバンドセット

Zono 専用の軽量の呼吸スイッチ。左（ダブル）クリック、ドラッグが可能です。非接触式なので衛生的で、複数人でシェアして使うこともできます。長さ 210mm のフレキシブルアームでポジションを調整できます。

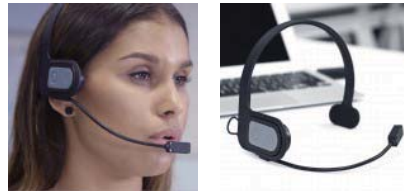

## ヘッドマウントキット

ネックバンドと眼鏡用クリップのキット  
 ネックバンドを使うと Zono を頭や首に装着することができます。  
 眼鏡用クリップを使うと Zono を眼鏡に装着することができます。 temple（ツル）の幅が 13mm 以下の眼鏡に対応しています。



## ヘッドバンド

ヘッドバンドを頭にかぶると、耳の上に Zono を装着することができます。枕やヘッドレストに頭をのせて使うなら、ヘッドマウントキットよりもこちらがおススメ。ブラック、ホワイト、レッド、パープルの 4 色展開。ブラックのみ 3 つのサイズを用意しています。 ※サイズの詳細はウェブサイトをご覧ください。



## ユニバーサルウェアキット

ユニバーサルクリップとベルクロのセットで、手や足に装着するときに使います。



品名	型番	内容	標準価格 (税込)
Zono	TQ-20	表面をご参照ください	90,720 円
Sento ヘッドバンドセット	TQ-190	Sento : Zono 専用呼吸スイッチ ヘッドバンド : 頭にかぶって装着するバンド	64,800 円
ヘッドマウントキット	TQ-101	ネックバンド : 頭や首に装着 眼鏡用クリップ : 眼鏡に装着	6,480 円
ヘッドバンド ブラック ラージ スモール ミディアム	TQ-160 TQ-164 TQ-165	頭にかぶって装着するヘッドバンド ※サイズ等の詳細はウェブサイトをご覧ください	7,020 円
ヘッドバンド ※ラージのみ ホワイト レッド パープル	TQ-161 TQ-162 TQ-163	頭にかぶって装着するヘッドバンド ※カラー等の詳細はウェブサイトをご覧ください	7,020 円
ユニバーサルウェアキット	TQ-180	ユニバーサルクリップ、ベルクロ	5,400 円

### ■ 公費給付の申請について

「Zono」を購入する際、自治体が行う「日常生活用具給付事業」における「情報・通信支援用具」として公費給付が受けられます。当社から発行する御見積書、カタログを揃えて各自治体へご申請ください。

販売元：テクノツール株式会社

www.ttools.co.jp

メール：office@ttools.co.jp

稲城事業所：東京都稲城市東長沼 2106-5 マスヤビル 4F  
 Tel: 042-370-6377 / Fax: 042-370-6378

大阪営業所：大阪府岸和田市野田町 1-12-10 シルクルーム 501  
 Tel: 050-3772-1412 / Fax: 042-370-6378

