



世界一軽い！装着型エア・マウス

Zono (ゾノ) は身体に装着して使うフィンランド製のワイヤレスマウスです。

高い精度と装着の自由度、多彩なユーザー補助機能、さらに外部スイッチやアプリとの併用による拡張性を備え、頸髄損傷や神経難病、脳性麻痺など様々な症状の方にお使いいただけます。

身体と一体化するマウス

身体に装着した Zono 本体の動きがマウスポインターの動きに変換されます。高精度ジャイロがわずかな動きでも捉えるため、まさに身体と一体化したような、なめらかな使い心地を実現しています。

自在な装着


マッチ箱ほどのサイズで重さはわずか 23g。世界一の軽さ（メーカー調べ）を誇るマウスです。ベルクローやヘッドバンドといったオプションを使い、頭や手足などユーザーが最も動かしやすい場所に装着できます。

多彩な調整・ユーザー補助機能

付属の調整ツール（Windows アプリ）を使って、感度調整や震え補正など様々な調整や補助機能のオン/オフが可能です。指定時間（0.1~5.0 秒）止めると自動で左クリックする「オートクリック」は非常に便利です。

スイッチやソフトとの組み合わせ

Zono にはスイッチを 2 つ接続でき、ダブルクリックや右クリックも可能になります。スイッチの連続入力に時間がかかるなら「ダブルクリックアシスト」をオンにしてみましょう。またソフトウェアとの組み合わせにより PC のあらゆる機能をマウスポインターの動きだけで使えます。もちろん**オペレートナビ**とも相性バツグンです。

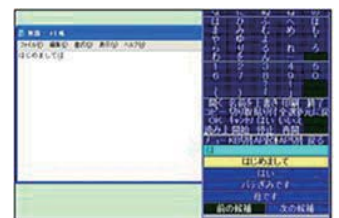

<仕様>



サイズ（送信機）	: 59 mm × 33 mm × 15 mm
重量（送信機）	: 23 g
対応機種	: HID マウスプロファイルに対応した Windows Vista 以降、Android Mac OS X 以降、Linux 等の端末 ※設定ソフトは Windows のみ対応
インターフェース	: USB 2.0（受信機）
無線	: 2.45 GHz 帯 最大接続距離 10m ※工事設計認証取得済み
電池	: リチウムポリマー充電電池

<パッケージ>

- ・送信機 × 1
- ・受信機（USB 差込式） × 1
- ・充電用ケーブル × 1
- ・スイッチ接続用アダプタセット × 1
- ・ユーザーマニュアル × 1
- ・設定ソフトインストール用 CD × 1



<動画で見たい>

www.ttools.co.jp にアクセス
↓
「製品」タブ→「Zono」をクリック

↓またはこちら↓



オプション・価格表

ヘッドマウントキット



ネックバンドと眼鏡用クリップが入っています。
ネックバンドを使うと Zono を頭や首に装着することができます。わずか 21g と軽く身体にフィットしやすい形状です。
眼鏡用クリップを使うと Zono を眼鏡に装着することができます。テンプル（ツル）の幅が 13mm 以下の眼鏡に対応しています。

ヘッドバンド

ヘッドバンドを頭にかぶると、耳の上に Zono を装着することができます。
枕やヘッドレストに頭をのせて使うなら、ヘッドマウントキットよりもこちらがおススメ。
ブラック、ホワイト、レッド、パープルの 4 色展開。ブラックのみ 3 つのサイズを用意しています。
※サイズの詳細はウェブサイトをご覧ください。



ユニバーサルウェアキット

ユニバーサルクリップとベルクロのセットで、手や足に装着するときに使います。

品名	型番	内容	標準価格 (税込)
Zono	TQ-20	表面をご参照ください	90,720 円
ヘッドマウントキット	TQ-101	ネックバンド : 頭や首に装着 眼鏡用クリップ : 眼鏡に装着	6,480 円
ヘッドバンド ブラック ラージ スモール ミディアム	TQ-160 TQ-164 TQ-165	頭にかぶって装着するヘッドバンド ※サイズ等の詳細はウェブサイトをご覧ください	7,020 円
ヘッドバンド ホワイト ※ラージのみ レッド パープル	TQ-161 TQ-162 TQ-163	頭にかぶって装着するヘッドバンド ※カラー等の詳細はウェブサイトをご覧ください	7,020 円
ユニバーサルウェアキット	TQ-180	ユニバーサルクリップ、ベルクロ	5,400 円

■ 公費給付の申請について

「Zono」を購入する際、自治体が行う「日常生活用具給付事業」における「情報・通信支援用具」として公費給付が受けられる可能性があります。
当社から発行する御見積書、カタログを揃えて各自治体へご申請ください。

販売元：テクノツール株式会社

www.ttools.co.jp

メール：office@ttools.co.jp

稲城事業所：東京都稲城市東長沼 2106-5 マスヤビル 4F
Tel: 042-370-6377 / Fax: 042-370-6378

大阪営業所：大阪府岸和田市野田町 1-12-10 シルクルーム 501
Tel: 050-3772-1412 / Fax: 042-370-6378

※受付時間 月曜日から金曜日 9時00分～12時 / 13時～17時30分

Facebook icon: 展示情報、お役立ち情報発信中！

