

注意

- ・デバイスから取り外す際および使用中に、3.5mm モノラルジャックやケーブルの根本に負荷をかけないでください。断線する恐れがあります。
- ・怪我の恐れがあるので、ストラップをきつく締めすぎないでください。

フィンガースイッチとは

丈夫で頑丈な素材で作られ、3 トンの力で 200,000 回テストされています。わずかな力でも、強い力でも操作できます。

ケーブルが長いので、スイッチの位置を自由に調整できます。底面にも面ファスナーが付いているので、布に直接貼りつけることもできます。面ファスナーストラップに貼りつけると、指、腕、頭など身体の様々な場所で使用できます。総重量はわずか 13.5g です。

スイッチの接続手順

1. フィンガースイッチを 3.5mm モノラルジャックに対応したデバイスに差し込む
2. 面ファスナーストラップを指、腕、頭など身体に巻き付け、きつくない程度に締める
またはフィンガースイッチを布に貼りつける。
3. フィンガースイッチを面ファスナーストラップに貼り付ける
4. フィンガースイッチの位置を微調整し、快適かつ簡単に押せるようにする

GS03 – フィンガースイッチ 仕様

寸法	: 長さ 18.5mm × 幅 18.5mm × 厚さ 11mm
重量	: 13.5g
ケーブル長	: 100cm
操作に必要な力	: 200g
面ファスナー	: 150mm × 150mm × 2mm

ボタン



裏面の面ファスナー



3.5mm ジャック

