

注意

デバイスから取り外す際および使用中に、3.5mm モノラルジャックやケーブルの根本に負荷をかけないでください。断線する恐れがあります。

ピロースイッチとは

スポンジとクッションを使用した、柔らかい押し心地のスイッチ。操作面は直径 8.63cm、操作に必要な力は 150g。動きの大きな人、小さな人の両方にとって押しやすい機構になっています。音とクリック感のフィードバックがあります。

面ファスナーや安全ピンを使って、クッションや車椅子のシート等に固定できます。

ケーブル長 : 185mm

コネクタ : 3.5mm モノラルジャック

スイッチの接続手順

1. ピロースイッチを 3.5mm モノラルジャックに対応したデバイスに差し込む
2. 面ファスナーを使ってクッションや枕に固定する、または安全ピンを使って布や車椅子のパッドに取り付ける

GS07 - ピロースイッチ 仕様

寸法 : 直径 96.9mm × 高さ 31.55mm

重量 : 73 ± 2g

ケーブル長 : 185cm ± 5cm

操作面 : 直径 8.63cm

操作に必要な力 : 150g

